

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ *VIVASALT Family*



ЗМІСТ

1. Загальна інформація	4
2. Застосування VIVASALT Family	5
3.Встановлення VIVASALT Family.....	5
3.1 Умови встановлення	5
4. Використання VIVASALT Family.....	6
4.1 Сіль	6
5.Очищення та обслуговування VIVASALT Family	10
6. Усунення несправностей.....	11
7.Гарантійні умови	12
7.1 Протипоказання у використанні	13
8. Умови зберігання.....	14
9. Утилізація.....	14





Шановний клієнте,

Вітаємо з придбанням пристрою для сольових сеансів бренду VIVASALT. Пристрій може прослужити тривалий час, якщо його регулярно доглядати та дотримуватись правил експлуатації, які вказані в даній інструкції.

Інструкція охоплює всю інформацію щодо встановлення, обслуговування, усунення несправностей пристрою та гарантійні зобов'язання.



1. Загальна інформація

Генератор використовується для створення сухого аерозолі. Соляний генератор розташовується всередині соляної кімнати, kabіни або будь-якого іншого приміщення. Галогенератор оснащений сенсорним екраном, що забезпечує зручність керування.

Сіль засипається в резервуар після зняття захисної воронки. Усередині пристрою млин подрібнює великі кристали солі до дрібних частинок і подає їх у повітряний потік, створений вентилятором. Завдяки цьому соляний аерозоль рівномірно розподіляється в kabіні або приміщенні.

Технічна інформація

Робоча вологість:	< 60%
Вага:	1 кг
Споживання:	30 Вт
Електрична напруга:	100–240 В
Розміри:	140 x 120 x 210 мм
Максимальне дозування солі:	30 г
Розмір соляної кімнати:	до 4 м ²


VIVASALT Family зручний у використанні.



2. Застосування VIVASALT Family

Пристрій VIVASALT Family використовується тільки для виробництва сухого аерозолю. Як правило, пристрій розташовується всередині приміщення. Це називається галотерапією або сольовим сеансом.

У млин засипається сіль (максимальний розмір частинок солі – 1 мм). Млин подрібнює сіль в аерозоль розміром з мікрон, який видувається вентилятором в приміщення. У приміщення потрапляє тільки аерозоль.

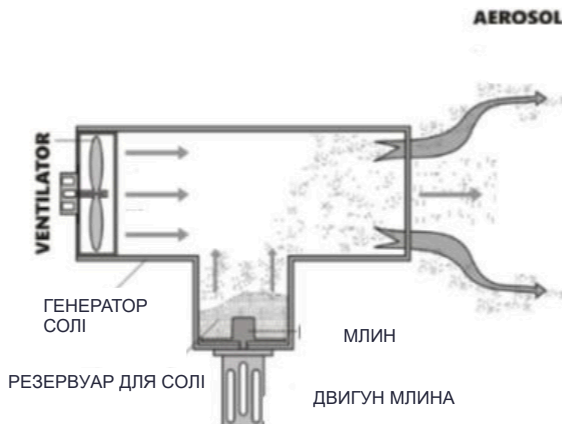

3. Встановлення VIVASALT Family

Встановлювати та підключати пристрій може лише уповноважена особа. Перед встановленням переконайтеся, що особа, яка встановлює пристрій, розуміється на встановленні аналогічних пристроїв, в інакшому випадку - гарантія не застосовується.

3.1 Умови встановлення

Середовище, в якому встановлюється VIVASALT, має бути сухим і теплим.

Граничний діапазон:

- температура від 18 до 25 градусів за Цельсієм;
- вологість від 20% до 50%.



4. Використання VIVASALT Family

4.1 Сіль

Для проведення соляних сеансів завжди використовуйте сіль високої якості, тобто чисту, без домішок і добавок. Можна також використовувати гімалайську сіль. Зазвичай вона упакована в мішки по 25 кг і, оскільки вона не містить добавок, може швидко затвердіти. Сіль дрібна (розмір 1 мм) і перед тим, як додати її в VIVASALT Family, необхідно переконатися, що немає грудочок, що вони не склеїлись і що температура відповідна. Зазвичай грудки розбивають за допомогою кухонної ступки.

Обладнання для підготовки солі:



КУХОННА СТУПКА



ІНДУКЦІЙНА ПЛИТА



ДЕРЕВ'ЯНА КУХОННА
ЛОЖКА




МЕТАЛЕВИЙ
ГОРЩИК (без кришки)

Прилад може бути пошкоджений при додаванні солі, яка не має відповідної температури і якщо в ній є грудочки. Якщо сіль не повністю суха, утворюється соляна кірка, і аерозоль не утворюється, оскільки сіль не потрапляє на млин.



За один раз у млин можна додати максимум 30 г солі - 2 чашки в комплекті

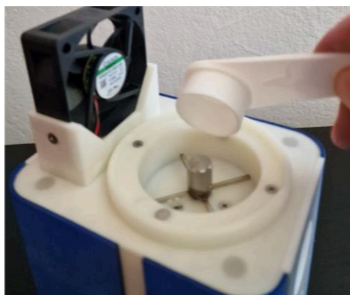

Максимум 2 мірні чашки!

Пристрій повинен бути підключений до електроживлення за допомогою з'єднувального кабелю. Підключіть інший кінець кабелю адаптера до роз'єму адаптера змінного струму на сольовому генераторі.


Початок сеансу:

Зверніть увагу, що всі знімні частини мають магніти для легшого складання/розбирання.




Відкритий галогенератор

Зніміть млинову воронку і додайте сіль:

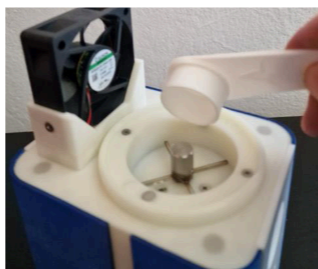

Поставте млинову воронку назад:

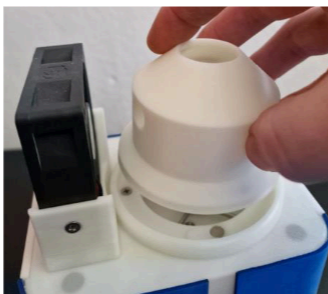

Поверніть верхню частину назад до галогенератора:



Піднесіть пульт дистанційного керування **(не обов'язково!)** до галогенератора і натисніть кнопку ON.

Галогенератор без пульта дистанційного керування починає сеанс роботи, коли ви підключаєте його до електромережі.



Зверніть увагу, що при натисканні кнопки «Пуск» почне працювати тільки вентилятор, а через деякий час млин почне молоти сіль.

З пультом дистанційного керування: натисніть OFF, коли хочете завершити сеанс.
Без пульта: відключіть адаптер від електромережі

5. Очищення та обслуговування VIVASALT Family

Технічне обслуговування пристрою можна проводити тільки у відключеному стані та від'єднаному від електромережі. Обслуговування включає щоденне очищення млина та інших поверхонь.

Очищення генератора виконується в наступному порядку:

1. Вимкніть генератор і витягніть шнур живлення з розетки.
2. Зніміть верхню частину галогенератора та захисну воронку млина.
3. Переверніть весь пристрій і обережно притримуйте його однією рукою.
4. Маленькою щіткою (пензлик) шириною до 2 см обережно очистіть поверхні навколо фрезерного ножа, а потім з усіх інших поверхонь, де видно наявність солі.

Після очищення пристрою поверніть воронку на місце та поставте його у сухе місце, недоступне для дітей та осіб, які не навчені користуватися приладом.



6. Усунення несправностей

Опис помилки	Ймовірна причина помилки	Рішення
Пристрій не працює.	Перевірте запобіжники.	Замініть головний запобіжник, перевірте підключення кабелів (адаптера).
	Проблеми з електричною напругою.	Перевірте підключення до мережі та кабелів живлення.
Пристрій не запускається.	Проблема з пультом дистанційного керування.	Підійдіть ближче до галогенатора з пультом дистанційного керування. Замініть батарейки в пульті дистанційного керування.
Двигун млина працює шумно або перегрівається.	Млин перевантажений сіллю або двигун заблокований.	Очистіть млин і переконайтеся, що сіль відповідає вимогам (без добавок і домішок).
Соляний млин працює нормально, але сіль до нього не потрапляє.	Проблеми в роботі вентилятора в галогенаторі та в якості солі.	Перевірте роботу вентилятора і переконайтеся, що сіль не волога (найкраще висушити її ще раз).
Відсутній аерозоль.	Перевірте сіль.	Від'єднайте шнур живлення від розетки. Перевірте, чи є сіль у дозаторі. Перевірте, чи не висохла сіль. Перевірте, чи не вийшов з ладу запобіжник, вентилятор і запобіжник дозатора.
Вихід з ладу запобіжника на пристрої.	Погано очищені частини млина, дозатора або вентилятора.	Очистіть апарат, як описано в розділі «Очищення», потім натисніть кнопку запобіжника, розташовану в нижній частині пристрою, і почніть сеанс.



7. Гарантійні умови

Гарантія розповсюджується на генератори VIVASALT, якщо є брак виробництва. Гарантійний ремонт може бути проведений тільки на ту продукцію, яка придбана офіційно у представника VIVASALT d.o.o. на території України.

Гарантія діє протягом 12 місяців з дати покупки і поширюється на випадки дефектів матеріалів або виробничих дефектів.

Не є гарантійними випадками:

1. Гарантія не розповсюджується на:

- Пошкодження пристрою через неправильне використання та/або використання не за призначенням;
- Неправильний догляд та обслуговування;
- Галогенератор був встановлений особою, яка не розуміється на принципах встановлення галогенераторів;
- Якщо зношені або пошкоджені деталі не були своєчасно замінені;
- У разі нерегулярного, неправильного чищення або якщо використовували методи не рекомендовані виробником
- При втручанні сторонньої особи або обслуговування неуповноваженою особою.

2. Гарантія не поширюється на помилки, що виникли внаслідок виробничого браку або прихованих дефектів матеріалу. Компанія VIVASALT d.o.o. або її уповноважений представник замінить дефектні деталі без додаткових витрат для покупця.

3. Компанія VIVASALT d.o.o. або її представник не несе відповідальності за втрату, пошкодження або травмування людей або майна, а також не гарантує відповідальності за скасування або збій у виконанні галогенератора та його установки, якщо роботи виконувалися неуповноваженою особою та без погодження з компанією VIVASALT d.o.o. або її представниками.



4. Гарантія не поширюється на будь-які витрати або збитки (комерційні чи некомерційні), які виникли б у разі виходу пристрою з ладу через виробничі дефекти або матеріал.

5. Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені продуктом, який не постачається компанією VIVASALT d.o.o. або його офіційним представником в Україні.

6. Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені форс-мажорними обставинами, такими як землетрус, повінь, пожежа або блискавка.

7. Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені напругою живлення та його впливом і порушеннями в існуючій установці.

8. Гарантійні зобов'язання виконуються відповідно до наступної процедури:

- Покупець повідомляє про це уповноваженого представника. Він намагається вирішити проблему за допомогою електронної пошти, телефону або інших засобів зв'язку. **У разі, якщо проблема не вирішується таким чином:**

- Покупець передає, за погодженням з уповноваженим представником, несправну частину пристрою на огляд і ремонт.

- Уповноважений представник виправляє і повертає покупцеві отриману частину пристрою. Гарантія не включає сервісне та технічне обслуговування пристрою.

- Ремонт і транспортування є безкоштовними, якщо буде встановлено, що це сталося з вини виробника.

7.1 Протипоказання у застосуванні

Покупець сольового пристрою VIVASALT несе відповідальність перед клієнтами і не буде вводити їх в оману та обіцяти неправдиві результати використання, особливо якщо це не рекомендовано людям з наступними станами здоров'я:

- * тяжка гіпертонія (підвищений тиск)
- * кровотечі
- * захворювання крові в гострій фазі
- * гостра фаза респіраторних захворювань
- * важка хронічна дихальна недостатність
- * активна форма туберкульозу
- * психічні захворювання та будь-яке вживання заборонених речовин
- * онкологічні захворювання
- * отруєння
- * метаболічні захворювання
- * вагітність
- * недостатність органів (особливо печінки та серця)
- * кровохаркання
- * серцева недостатність
- * хронічна обструктивна хвороба легень



Сольова терапія не є заміною ліків та лікування. Якщо у клієнта є проблеми зі здоров'ям, необхідна консультація лікаря щодо проходження соляних процедур.

Важливо:

- У разі сумнівів щодо впливу соляних процедур на здоров'я, пацієнт повинен проконсультуватися зі своїм лікарем.

8. Умови зберігання

Якщо з будь-яких причин необхідно розібрати пристрій, його потрібно зберігати в оригінальній упаковці, в якій він був отриманий. Перед зберіганням пристрій необхідно добре почистити. Зберігати при температурі від 5 до 30 градусів за Цельсієм і вологості до 60%.

9. Утилізація

Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами, а здайте його в пункт збору. Утилізація повинна відбуватись відповідно до норм місцевого законодавства.

